



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

MINI VODIČ

CHARISMA ONE
PRIKAZ SLUČAJA
PRIJE I POSLIJE

Što treba uzeti u obzir prije
učitavanja slučaja ONE

ONE

EXPERIENCED
SOLUTION





KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Uvjeti koje je potrebno ispuniti vezano uz slučaj:

- Provjerite prikazuju li fotografije uporabu proizvoda **Charisma Diamond / Charisma Topaz ONE**.
- Usredotočite se na **svakodnevne osnovne restauracije (po mogućnosti slučajeve stražnjih zuba - klasa I i II)** koje se obično ne individualiziraju nijansama boja.
- U slučaju da je prikazan cijeli tretman, uzmite u obzir sljedeće korake: početnu situaciju, ekskavaciju, pripremu, nanošenje ljepila (GLUMA Bond Universal), određivanje Charisma ONE nijanse, doradu i poliranje (Charisma EasyShine) te, ako je moguće, stanje poslije rehidracije.
- Preporučena je uporaba gumenog štitnika (koferdama).

Uvjeti koje je potrebno ispuniti vezano uz fotografije:

- Preporučena je uporaba digitalnog SLR fotoaparata s prstenastom ili bočnom bljeskalicom **u kombinaciji s makro objektivom**.
- Snimajte fotografije u **RAW-, TIF- ili JPEG- formatu** najviše kvalitete.
- Fotografije trebaju biti **oštre s velikom dubinom polja (velika vrijednost otvora blende)**.
- Koristite se uvijek istim detaljima u seriji fotografija.
- Po mogućnosti se koristite čistim, **nezamagljenim foto-ogledalom** za okluzalne/lateralne fotografije.
- Provjerite je li retrakcija usana i jezika zadovoljavajuća, a **klinička situacija čista i suha**.
- Ako snimate fotografije cijeloga lica na kojima je pacijent prepoznatljiv, svakako pribavite pisani pristanak pacijenta (čuvajte ga u svojoj evidenciji).

VODITE RAČUNA O SLJEDEĆEM:

- VAŽNO JE DA PREDSTAVLJATE SVAKODNEVNE CHARISMA ONE SLUČAJEVE, A NE VISOKOESTETSKE KARAKTERIZACIJE S VIŠE NIJANSI NI INDIVIDUALNE KARAKTERIZACIJE (NPR. BOJENJE FISURA)
- PREPORUCUJE SE UPORABA ISKLJUCIVO JEDNE NIJANSE
- DOBRA PRILAGODBA BOJE, PO MOGUĆNOSTI U SLUČAJEVIMA STRAŽNJIH ZUBA - KLASA I I II
- IZVRSNA SVOJSTVA RUKOVANJA: OSTAJE NA MJESTU, OKLUZALNE FUNKCIONALNE POVRŠINE MOGU SE USPOSTAVITI LAKO I BRZO BEZ SLIJEGANJA MATERIJALA
- ČVRSTOĆA MATERIJALA: MATERIJAL JE PRIKLADAN I ZA VEĆE RESTAURACIJE. ZAHVALJUJUĆI NJEGOVOJ ČVRSTOĆI SMANJUJE SE POJAVA OTKRHNUĆA ZUBA I LOMOVA. ČVRSTOĆA SE POSTIŽE ZAHVALJUJUĆI JEDINSTVENOM TCD-MONOMERU
- IZVRSNA MOGUĆNOST POLIRANJA MATERIJALA, OSOBITO U KOMBINACIJI S PROIZVODOM CHARISMA EASYSHINE
- PREPORUCUJE SE UPORABA LJEPILA GLUMA BOND UNIVERSAL
- SVI PRIKAZI SLUČAJEVA MORAJU PRIKAZIVATI PROIZVODE KULZER PREMA NJIHOVIM UPUTAMA ZA UPORABU TE PREMA INDIKACIJAMA (BEZ UPORABE KOJA NIJE NAVEDENA NA ETIKETI!)



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



Fotografije „prije i poslije“ – primjeri:



dr. Dominik Ślusarczyk
Katowice, Poljska

Zamjena nezadovoljavajuće restauracije staklenoionomerima s pomoću proizvoda Charisma Diamong ONE.



dr. Ubiracy Gaião
Paraná, Brazil

Restauracija kvadranta s pomoću proizvoda Charisma Diamong ONE.



dr. Andreas Spaveras
Atena, Grčka

Rekonstrukcija velikih karijesnih lezija s pomoću proizvoda Charisma Diamong ONE.

